

# PREEMIES TAILLE 1 & 2

MAM

- Suce pour les nouveau-nés et les nouveau-nés de faible poids de naissance
- Prête à l'utilisation – pour distribution et utilisation dans les hôpitaux uniquement
- Sans latex

Taille 1  
<  
1,000 g

Taille 2  
900 –  
1,500 g

SANS  
BPA  
BPS

Silicone  
Skin  
Soft™

## Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation! Elles s'appliquent aux suces MAM Preemies de tailles 1 et 2. Des instructions distinctes sont disponibles pour la suce MAM Comfort™.

CE Dispositif Médical Class 1

Sans BPA/BPS : Tous les produits MAM sont fabriqués avec des matériaux sans BPA et BPS

## Les avantages des suces

Les suces MAM Preemie sont conçues pour être utilisées sous supervision médicale chez les bébés prématurés d'un poids corporel maximal de 1 500 g afin de compenser le réflexion de succion et de déglutition habituellement présent. Les suces aident à satisfaire le besoin naturel de succion des bébés. Les suces peuvent contribuer à soulager la douleur chez les bébés pendant les interventions médicales. De plus, les suces facilitent la transition du gavage à l'allaitement ou à l'alimentation au biberon puisqu'elles renforcent la musculature orale. La suce est l'une des nombreuses stratégies utilisées pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).



## Quant utiliser ce produit

Les suces MAM Preemies sont conçues pour être utilisées sous supervision médicale chez les bébés prématurés d'au plus 1 500 g.

MAM Preemie, taille 1 – pour les bébés de moins de 1 000 g

MAM Preemie, taille 2 – pour les bébés de 900 à 1 500 g

La suce est destinée exclusivement à un bébé prématuré dont le poids se situe dans la tranche de poids fournie (voir l'imprimé sur le sac) et ne peut être utilisée que pendant le séjour à l'hôpital.

## Comment nettoyer et utiliser ce produit

Les suces MAM Preemies font l'objet d'une réduction des germes par irradiation aux rayons gamma et sont prêtes à l'utilisation, à condition que l'emballage soit intact. Si l'emballage est endommagé, nettoyez et traitez par autoclave avant la première utilisation. Laissez refroidir. Nettoyez après chaque utilisation. Lavez avec de l'eau légèrement savonneuse, puis rincez à l'eau claire. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Autoclavable jusqu'à 134 °C/273 °F pour un maximum de 18 minutes (au plus 20 fois). Laissez reposer pendant au moins 5 minutes avant de donner le produit au bébé. Après le nettoyage ou le passage à l'autoclave, expulsez l'eau restante en pressant la tétine avec des pinces à tétine stérilisées. Remplacez la suce au moins tous les mois. N'utilisez que pour un seul bébé. Les tailles et les poids sont fournis à titre de directives générales seulement. Adaptation et utilisation individuelles avec tube oral et nasal : le produit peut être adapté en le coupant avec des ciseaux ou un scalpel (voir figures 1 et 2). Jetez toutes les petites pièces immédiatement après la coupe afin d'éviter tout risque d'étouffement.


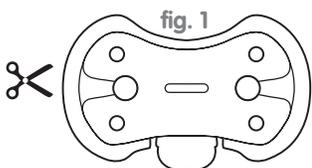


fig. 1

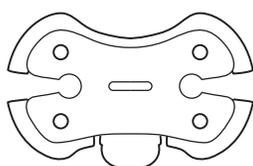

Version minimum  
Preemie Taille 1


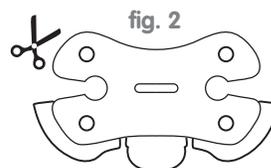


fig. 2

Preemie de taille 2  
uniquement!

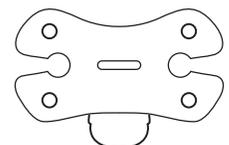

Version minimum  
Preemie Taille 2

## Quand ne pas utiliser ce produit


Les sucres MAM Preemies de tailles 1 et 2 ne peuvent être utilisées que sous supervision médicale dans le cadre d'un séjour à l'hôpital. Par conséquent, les parents ne doivent JAMAIS être autorisés à apporter le produit à la maison.

Les sucres MAM Preemie de taille 1 ne doivent pas être utilisées pour des bébés de plus de 1 000 g.  
Les sucres MAM Preemie de taille 2 ne doivent pas être utilisées pour des bébés de moins de 900 g ou de plus de 1 500 g.

La taille de la suce est inscrite en relief sur la tétine.

## **⚠ ATTENTION! Pour la sécurité et la santé de votre enfant.**

ATTENTION : Cette suce est destinée à un nourrisson prématuré. L'utilisation de ce produit au-delà de l'âge recommandé pourrait présenter un risque d'étouffement. Cessez d'utiliser ce produit lorsque le nourrisson atteint l'âge de développement de 27 semaines (<1 000 g) dans le cas de la Preemie 1 ou de 30 semaines (<1 500 g) dans le cas de la Preemie 2. Veuillez consulter votre médecin.

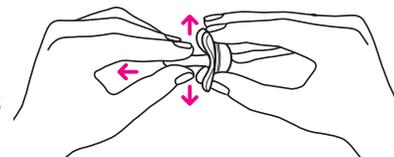

Inspectez soigneusement la suce avant chaque utilisation. Tirez la suce dans tous les sens. Jetez-la dès les premiers signes d'endommagements ou de faiblesse.

Ne laissez jamais une suce à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (sauf pendant le nettoyage), et ne la laissez jamais dans une solution de nettoyage plus longtemps que ce qui est recommandé, cela pourrait fragiliser la tétine. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas le sac de plastique à la portée des bébés ni des enfants. N'utilisez pas le sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs. Ce sac n'est pas un jouet. N'attachez pas la suce autour du cou de votre enfant, cela présente un risque d'étranglement. Le produit ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables aux sucres normales, notamment EN 1400 et 16 CFR 1511. Elle présente un risque d'étouffement. Par conséquent, elle ne doit être utilisée que sous supervision médicale. Les parents ne doivent jamais être autorisés à apporter le produit à la maison.

## Composition de ce produit

Les sucres MAM Preemies sont entièrement faites de silicone inodore.

## Comment ranger et jeter ce produit

La suce doit être rangée à la température ambiante, soit entre 5 °C et 30 °C / 41 °F et 86 °F.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.


La date d'expiration figure sur l'emballage. Remplacez la suce au moins tous les mois. Jetez ce produit avec les déchets hospitaliers généraux.

Le numéro de lot figure sur l'emballage.

Date de l'information : 10/2018 – V.1.0

## MAM Premies & MAM Comfort™

Chaque bébé est spécial : MAM a développé une gamme de sucres spécialement conçue pour répondre aux besoins des nouveau-nés prématurés et des nouveau-nés de faible poids de naissance.

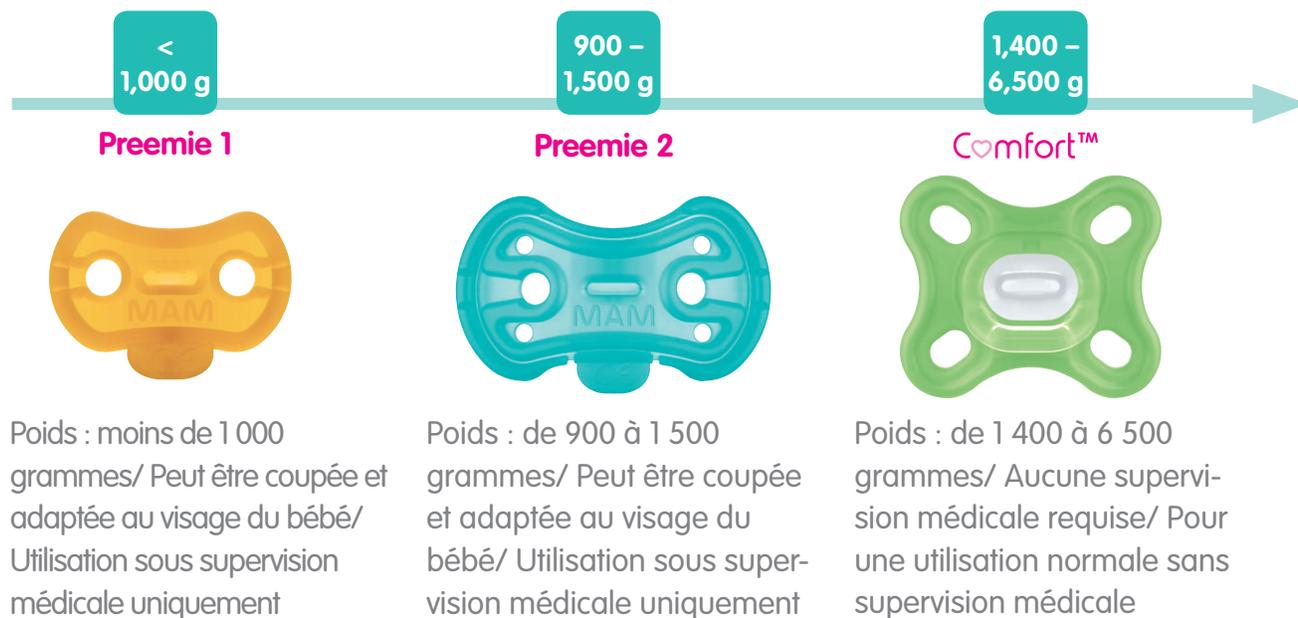

Numéro de brevet: US 7789894

MAM International AG, Sihleggstrasse 15,  
8832 Wollerau, Switzerland.

Fabriqué en Autriche.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

MAM USA Corporation  
2700 Westchester Avenue  
Suite 315

Purchase, NY 10577

914-468-4048

NICUcustomerservice@mambaby.com

Plus de produits MAM sur [mambaby.com](http://mambaby.com)

Veuillez conserver le mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.