

LE MODE D'EMPLOI

- Suce pour bébés prématurés et nouveau-nés à faible poids de naissance
- Prête à l'utilisation – pour distribution et utilisation dans les hôpitaux uniquement
- Sans latex
- Construction monopièce légère

900 –
1,500 g

SANS
BPA
BPS

Silicone
Skin
Soft™

Dispositif Médical





Sans BPA/BPS : Tous les produits MAM sont fabriqués avec des matériaux sans BPA et BPS.

⚠ Pour la sécurité de votre enfant ATTENTION!

Inspectez soigneusement la suce avant chaque utilisation. Tirez la suce dans tous les sens. Jetez-la dès les premiers signes d'endommagements ou de faiblesse. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas le sac de plastique à la portée des bébés ni des enfants. N'utilisez pas le sac dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs. Ce sac n'est pas un jouet. N'attachez pas la suce autour du cou de votre enfant, cela présente un risque d'étranglement. Le produit ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables aux sucres normales, notamment EN 1400 et 16 CFR 1511. Elle présente un risque d'étouffement. Par conséquent, elle ne doit être utilisée que sous supervision médicale. Les parents ne doivent jamais être autorisés à apporter le produit à la maison.

Lire le mode d'emploi :

Germes réduits par irradiation gamma et prêts pour la première utilisation. Suivez les instructions d'utilisation sur la façon de nettoyer et l'autoclave avant utilisation, l'adaptation individuelle (fig.1) et l'utilisation avec la tubulure orale et nasale.

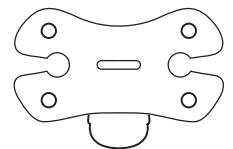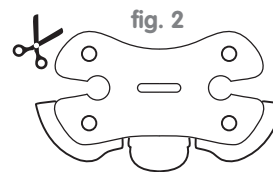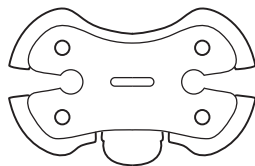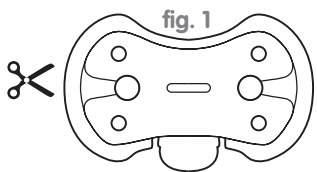

Version Minimum

MAM International AG, Sihleggstrasse 15,
8832 Wollerau, Switzerland.

Fabriqué en Autriche.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

MAM USA Corporation
2700 Westchester Avenue
Suite 315

Purchase, NY 10577

914-468-4048

NICUcustomerservice@mambaby.com

Prêt à l'utilisation

Non destiné à la vente au grand public