



Storage Solution

Online Shop

DE

DE: Aufbewahrungsbecher

Gebrauchshinweise:

- Überprüfen Sie sämtliche Komponenten vor jedem Gebrauch. Werfen Sie das Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Das Produkt ist für den Lebensmittelkontakt geeignet
- Verwenden Sie einen Bleistift zum Beschriften des abwaschbaren Beschriftungsfelds. Verwenden Sie keine wasserfesten Stifte.

Reinigen und sterilisieren:

- Trennen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile voneinander und legen Sie sie 5 Minuten lang in kochendes Wasser. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene.
- Geeignet für die Reinigung im oberen Fach des Geschirrspülers (65 °C). Einzelteile können durch Lebensmittel verfärbt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur weiche Bürsten oder Schwämme. Grobe/harte Reinigungsbürsten können den Kunststoff zerkratzen.
- Beim Sterilisieren kann eine der folgenden Methoden verwendet werden: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle gemäß den Angaben des Herstellers), Sterilisieren in kochendem Wasser (mindestens 5 Minuten lang) oder in einer Sterilisationslösung.
- Verwenden Sie beim Sterilisieren der Aufbewahrungsbecher mit dem MAM Elektrischen Sterilisator und Express-Flaschenwärmer oder dem MAM Mikrowellen-Dampfsterilisator nur einen Korb.
- Im trockenen Zustand nach dem Reinigen/Sterilisieren stapelbar.

Gebrauch mit Muttermilch:



- Tauen Sie Muttermilch nicht in der Mikrowelle auf, da so wertvolle Nährstoffe zerstört werden.
- Es wird empfohlen, Muttermilch in kleinen Portionen von 40 bis 120 ml einzufrieren.
- Tauen Sie gefrorene Muttermilch schonend über 24 Stunden im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur auf.
- Stellen Sie die Milch zum Erwärmen in ein Wasserbad oder verwenden Sie einen Flaschenwärmer. Um die Milch auf Körpertemperatur zu erwärmen, können Sie sie auch unter fließendes, warmes Wasser halten. Drehen Sie zuerst das kalte Wasser auf und erhöhen Sie langsam die Temperatur, bis die Milch warm ist.
- Muttermilch darf unter keinen Umständen erneut eingefroren werden. Reste aufgewärmter Milch müssen daher entsorgt werden.
- Mischen Sie niemals frisch abgepumpte und gefrorene Milch.
- Achten Sie beim Transportieren von Muttermilch darauf, dass die Kühlkette eingehalten wird.

Erwärmen von Babynahrung (nicht überhitzen):

- Zum Aufwärmen von Babynahrung empfehlen wir, ein heißes Wasserbad oder einen Flaschenwärmer zu verwenden.
- Entfernen Sie den Deckel des Aufbewahrungsbechers, bevor Sie ihn in das heiße Wasserbad oder den Flaschenwärmer stellen.
- Rühren Sie nach dem Erwärmen die Babynahrung um, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt, und lassen Sie sie abkühlen.

Gebrauch in Verbindung mit der MAM Handmilchpumpe mit Aufbewahrungsbecher:

- 1) Entfernen Sie das Bodenventil von der Easy Start Anti-Colic Flasche und schrauben Sie stattdessen den Aufbewahrungsbecher an. Schrauben Sie dann beides zusammen an die Pumpe. Geeignet für alle Größen der Easy Start Flasche (Abb. 1).
- 2) Legen Sie die Pumpe an und beginnen Sie mit dem Abpumpen. Informationen zum Gebrauch finden Sie im Handbuch der MAM Handmilchpumpe (Abb. 2).
- 3) Schrauben Sie den Aufbewahrungsbecher ab und verschließen Sie ihn mit dem Deckel (Abb. 3). Die Becher sind platzsparend stapelbar (Abb. 4).
- 4) Verwenden Sie zum Beschriften mit Datum und Uhrzeit die speziell dafür vorgesehenen Felder auf dem Aufbewahrungsbecher. Verwenden Sie am besten einen Bleistift.
- 5) Lagern Sie die Milch nicht länger als jeweils empfohlen.
Raumtemperatur (16-29 °C): 4 Stunden
Kühlschrank (4 °C): 4 Tage
Gefrierschrank (-18 °C): 6 Monate
- 6) Verwenden Sie stets die Muttermilch zuerst, die am längsten gelagert wurde.

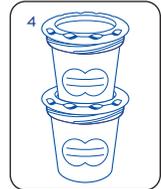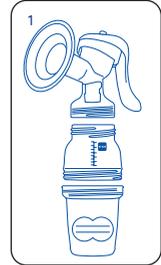

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes VORSICHT!

- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.