



MAM hygiënedoekjes

Snel werkzaam bij bacteriën, virussen en schimmels – voor waterbestendige oppervlakken en voorwerpen

MAM hygiënedoekjes reinigen en desinfecteren medische hulpmiddelen in het huishouden (bijv. koortsthermometers), speelgoed en oppervlakken snel en op een bijzonder zachte wijze.

Dé perfecte hygiënebescherming voor thuis en onderweg, op reis, in gemeenschappelijke en medische faciliteiten.

- Snel werkzaam bij bacteriën, schimmels en virussen.
- Beste materiaalcompatibiliteit, geschikt voor gebruik op kunststof en acrylglas.
- Medisch hulpmiddel, gecontroleerd en getest volgens EN 1276, 13697, 1650, 13727, 13624.
- Huidvriendelijk en dermatologisch getest met het resultaat "zeer goed" bij Dermatest Münster
- Vrij van kleurstoffen, alcohol (ethanol), fenol en aldehyde. Bevat geen olie.

Gebruik

- Voor de reiniging moeten de oppervlakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging, met MAM hygiënedoekjes worden afgeveegd.
- Veeg het oppervlak grondig af met het MAM hygiënedoekje om het te desinfecteren. Het oppervlak moet voldoende worden bevochtigd met het desinfectiemiddel.
- Voer bij zichtbare verontreinigingen eerst een voorbereidende reiniging uit met een MAM hygiënedoekje, om een volledige desinfecterende werking te garanderen.
- Laat de achterblijvende vloeistof minstens 60 seconden inwerken voor een bacteriëndodende desinfecterende werking. Verdere inwerktijden vindt u in de tabel (zie onderaan).
- De huidvriendelijkheid is dermatologisch beoordeeld door Dermatest (Münster) als "zeer goed".
- Achterblijvende resten op kinderstoelen of luierkussens zijn dermatologisch onschadelijk voor de menselijke huid.
- Droog voorwerpen die in de mond worden genomen na reiniging af met een droge doek.
- Achterblijvende vloeistofresten zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
- Na gebruik de verpakking sluiten. Na uitdroging kan geen desinfecterende werking worden gegarandeerd.
- Reinigings- en desinfectiemiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Werkingspectrum

Werkzaamheid: bacteriën-, schimmel- en virusdodend (omhulde virussen, HIV, HBV, HCV, norovirus, rotavirus, vacciniavirus, BVDV).

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de



mambaby.com

Bijzondere aanwijzingen

Het product is geen gevaarlijke stof volgens de Verordening Gevaarlijke Stoffen. Door zijn samenstelling brengt het product geen aanwijsbare arbeidsrisico's met zich mee. Bij het gebruik van dit product zijn geen beroepsziekten of allergieën vastgesteld. Neem het partijnummer en de houdbaarheidsdatum in acht (zie aparte opdruk op de verpakking). Houdbaarheidsdatum: 36 maanden na de productiedatum. De vochtigheid van de doekjes vervliegt niet zoals bij andere alcoholische desinfectiedoekjes. Onder extreme testcondities is gebleken dat de doekjes door het hersluitbare etiket maandenlang hun volledige werking behielden. Zelfs bij een volledig geopende verpakking waren er geen beperkingen. Daarom kunnen de doekjes tot 1 maand worden gebruikt na de eerste opening.

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

Toepassingsconcentraties voor de desinfectie van oppervlakken

Doseerinformatie	Inwerktijd	Opmerking
onverdund	60 s	bacteriëndodend/schimmelwerend EN 1276, EN 13697, EN 1650
onverdund	5 min	bacteriëndodend/schimmelwerend (volgens de Duitse Vereniging voor Hygiëne en Microbiologie (DGHM)) lage belasting/mechanica
onverdund	60 s	omhulde virussen (HIV, HBV, HCV, BVDV, vacciniavirus, griepvirus) EN 14476
onverdund	30 min	Norovirus (MNV) EN14476
onverdund	60 s	Rotavirus
onverdund	5 min	Polyomavirus SV40

Ingrediënten

100 g vloeistof bevat:

0,25 g DIALKYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE •

0,25 g BENZALKONIUMCHLORIDE •

0,25 g ALKYLDIMETHYL (ETHYLBENZYL) AMMONIUMCHLORIDE.

Fysisch-chemische gegevens

pH-waarde (gebruik): 7



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

Leveringsvormen

GTIN:
4042894 330036

Verpakkingsgrootte:
desinfecterende hygiënedoekjes van MAM, 24 doekjes in
foliezakje met hersluitbaar etiket



mambaby.com

Registraties

Dit medische hulpmiddel is CE-gecertificeerd (CE 0481).



0481

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefoon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de