



Nasal Aspirator

Online Shop

ES

Aspirador Nasal

Instrucciones de uso

Lávelo antes de utilizarlo por primera vez. Comprima el aspirador para eliminar el aire. Introduzca suavemente la punta en una fosa nasal mientras mantiene cerrada la otra. Libere lentamente la presión del aspirador y la succión extraerá la mucosidad de las fosas nasales del bebé. Repita según sea necesario. Límpielo inmediatamente después de su uso. Apto para esterilizadores. Apto para la bandeja superior del lavavajillas.

PARA LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ

¡ADVERTENCIA!

NUNCA comprimir el aspirador mientras esté dentro de la nariz del bebé. NUNCA utilizar en la boca o los oídos del bebé. ¡Este producto no es un juguete! Contiene piezas pequeñas; para evitar riesgo de lesión, mantener fuera del alcance de los niños. Examinar antes y después de cada uso. Desechar al primer signo de daño o rotura. Por favor, conserve el embalaje para futuras consultas. No recomendado para usar con leche materna.