



Nasal Aspirator

Online Shop

FR

Aspirateur Nasal

Mode d'emploi

Lavez le mouche-bébé avant la première utilisation. Comprimez doucement la poire pour expulser l'air. Placez délicatement l'embout dans une narine de votre bébé, tout en maintenant l'autre narine fermée.

Relâchez lentement la pression pour créer une aspiration douce qui aide à retirer les mucosités des voies nasales de bébé.

Répétez l'opération si nécessaire. Nettoyez immédiatement le mouche-bébé après chaque utilisation. Le mouche-bébé est compatible avec les stérilisateurs et lavable au lave-vaisselle (panier supérieur).

POUR LA SECURITE DE VOTRE ENFANT - AVERTISSEMENTS !

NE JAMAIS comprimer le mouche-bébé dans le nez de bébé. NE JAMAIS comprimer le mouche-bébé dans la bouche ou les oreilles de bébé. Ce produit n'est pas un jouet.

Il contient des petites pièces : pour éviter tout risque de blessure, gardez-le hors de portée des enfants.

Inspectez le mouche-bébé avant et après chaque utilisation. Remplacez-le immédiatement dès les premiers signes d'usure, de faiblesse ou de dommage. Conservez l'emballage pour consultation ultérieure. Ne pas utiliser avec du lait maternel.