



Storage Solution

Online Shop

DK/NO

DK/NO: Storage Solution

BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING:

- Kontroller altid alle dele inden/før brug/bruk. Smid ud/kast, så snart der er tegn på skader eller svagheder/svakheter.
- Produktet er egnet til kontakt med fødevarer/mat.
- Skriv med blyant på det vaskbare mærkningsområde/merkingsområdet. Brug/bruk ikke tusch/tusj.

Rengøring og sterilisering:

- Inden bægre/fæstetages/tas i brug/bruk, skal det skilles ad i alle sine enkeltdele/alle delene skilles og lægges i kogende vand/vann i 5 minutter. Dette gøres/gjøres for at sikre en god hygiejne.
- Tåler opvaskemaskine i øverste bakke/skuff (65 °C), men farvestoffer fra levnedsmidler/matvarer kan misfarve delene.
- Anvend aldrig slibende/slipende rengøringsmidler. Der bør kun anvendes bløde/myke svampe eller børster med bløde/myke børstehår. Ru/hårde/harde svampe kan ridse/skrabe opp platen.
- Sterilisering kan udføres på en af følgende måder/måter: dampsterilisering (elektrisk ovn eller mikrobølgeovn i henhold til producentens anvisninger), kogning/koking i vand/vann i mindst 5 minutter eller nedsænkning i en steriliserende væske.
- Ved brug/bruk af MAM dampsterilisator til mikroovn til sterilisering, skal der kun anvendes én bakke.
- Kan stables, når de er tørre efter rengøring/sterilisering.

Ved brug/bruk til modermælk/brystmælk:

- Modermælk/brystmælk må ikke optøes/tines i mikrobølgeovnen, da det forringer/reducerer mælken næringsværdi.
- Det anbefales, at modermælk/brystmælk fryses ned i små portioner af 40–120 ml.
- Tø/tin mælken op natten over/over natten i køleskab eller ved stuetemperatur/romtemperatur.
- Varm mælken op i vandbad/vannbad eller en flaskevarmer. Hvis den skal varmes op til kropstemperatur, kan man også bruge/bruke rindende/rennende vand/vann. Start med koldt/kalt rindende/rennende vand/vann, og øg/øk gradvist temperaturen, indtil mælken er varm.
- Modermælk/brystmælk må aldrig genfryses/gjenfryses. Overskydende opvarmet mælk skal kasseres/kastes.
- Bland aldrig nyudmalket mælk/fersk brystmælk med frossen mælk.
- Ved transport af modermælk/brystmælk er det vigtigt, at kølekæden ikke brydes/å holde den nedkjølt hele tiden.

Opvarmning af babymad/babymat (må ikke overophedes/overoppheles):

- Når du skal varme babymad/babymat, anbefaler vi, at du placerer den i et vandbad/vannbad eller en flaskevarmer.
- Tag låget af/ta lokket af Storage Solution, inden/før du lægger/legger bægre/begeret i vandbad/vannbad eller flaskevarmeren.
- For at fordele varmen i babymaden/babymaten skal du røre omhyggeligt/grundigt efter opvarmningen og lade/la maden/maten køle af/avkjøles.

Ved brug/bruk i kombination med MAM

Manual Breast Pump:

- 1) Tag/ta Easy Start Anti-Colics ventilationsbund/ventilationsbunn af, og skru Milk Storage Solution fast. Enheden kan nu skrues fast på pumpen. Easy Startflasker i alle størrelser kan bruges/brukes på denne måde/måten (ill. 1).
- 2) Før pumpen op til brystet, og påbegynd/begynn udmalkningen/utdrivingen. Se i brugsanvisningen/bruksanvisningen til MAM Manual Breast Pump, hvordan man gør/gjør det (ill. 2).
- 3) Skru Milk Storage Solution af, og luk forsvarligt med låget/løkket (ill. 3). Du kan stable bægrene/begrene for at spare plads/plass (ill. 4).
- 4) Brug/bruk mærkningsområde/merkingsområdet på Milk Storage Solution til at mærke bægre/begrene med dato og tidspunkt. Blyant fungerer bedst.
- 5) Opbevar ikke længere end den anbefalede tid.

Stuetemperatur/romtemperatur 4 timer
Køleskab 3 dage/72 timer (4 °C). Fryser 3 måneder (–20 °C)

- 6) Brug/bruk den ældste/elste modermælk/brystmelken først.

For dit barns sundheds/helse og sikkerhed ADVARSEL!

- Dette produkt må aldrig anvendes uden/uten opsyn af en voksen.
- Alle dele, der ikke er i brug/bruk, skal opbevares utilgængeligt/utilgjengelig for børn/barn.

