

MAM Hygiene Range - FAQs

MAM Hygienetücher: Häufig gestellte Fragen

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

1. Wie wendet man die MAM Hygienetücher an?
2. Sind die MAM Hygienetücher auch für Gegenstände mit Mundkontakt geeignet?
3. Muss man die Gegenstände nach der Verwendung von MAM Hygienetüchern abspülen?
4. Sind die MAM Hygienetücher dermatologisch getestet?
5. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die persönliche Hygiene verwenden?
6. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die Reinigung von Menstruationstassen verwenden?
7. Wie lange sind die MAM Hygienetücher haltbar?
8. Dürfen benutzte, oder abgelaufene MAM Hygienetücher im Hausmüll entsorgt werden?
9. Kann man die MAM Hygienetücher in der Toilette herunterspülen?
10. Wie kann ich die MAM Hygienetücher zur Flächendesinfektion einsetzen?
11. Wie oft sollte ich Spielzeug reinigen?
12. Wie sollte ich Spielzeug reinigen?
13. Enthalten die MAM Hygienetücher Farb- oder Duftstoffe?
14. Enthalten die MAM Hygienetücher Alkohol?
15. Kann ich die MAM Hygienetücher auch auf Oberflächen aus Kunststoff oder Acrylglas verwenden?

1. **Wie wendet man die MAM Hygienetücher an?**

Oberfläche mit dem MAM Hygienetuch gründlich abwischen. Es bildet sich ein leichter Schaum auf der Oberfläche. Dieser hilft zu erkennen, welche Bereiche bereits benetzt sind. Restflüssigkeit des Schaums mindestens 60 Sekunden einwirken lassen. Informationen zu den Bedingungen und Einwirkzeiten bei der Anwendung als Flächendesinfektion auf mambaby.com/hygiene
Packung nach Gebrauch gut verschließen. Nach Austrocknung ist eine Desinfektionswirkung nicht sichergestellt. Gegenstände, die in den Mund genommen werden, nach Reinigung trocken nachwischen. Verbleibende Restrückstände der Flüssigkeit sind gesundheitlich unbedenklich. Hygienetücher für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hygienetücher sind nicht für die persönliche Hygiene (Körperhygiene, z.B. Windelbereich) geeignet.

2. **Sind die MAM Hygienetücher auch für Gegenstände mit Mundkontakt geeignet?**

Ja, sie können die MAM Hygienetücher auch für die sichere Hygiene von Gegenständen mit Mundkontakt (z. B. Fieberthermometer oder Schnuller) verwenden. Gegenstände, die in den Mund genommen werden sollten Sie zusätzlich nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

3. Muss man die Gegenstände nach der Verwendung von MAM Hygienetüchern abspülen?

Es reicht, wenn Sie die Gegenstände nach dem Abwischen trocknen lassen. Gegenstände, die in den Mund genommen werden sollten Sie zusätzlich nach Reinigung mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken nachwischen.

4. Sind die MAM Hygienetücher dermatologisch getestet?

Ja, die MAM Hygienetücher wurden dermatologisch mit „Sehr gut“ getestet. Sie sollten jedoch nicht zur persönlichen Hygiene angewendet werden.

5. Wie lange sind die MAM Hygienetücher haltbar?

Nach Erstöffnung können Sie die Tücher für einen Monat verwenden.

6. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die Reinigung von Menstruationstassen verwenden?

Grundsätzlich sind die MAM Hygienetücher für diese Art der Anwendung sehr gut geeignet, sofern nach erfolgter Anwendung die Menstruationstasse mit klarem Wasser nachgespült wird.

7. Kann man die MAM Hygienetücher auch für die persönliche Hygiene verwenden?

Nein, die Hygienetücher von MAM wurden für die sichere Hygiene von Medizinprodukten im Haushalt (z. B. Fieberthermometer), Gegenständen (z. B. Babyzubehör) und Oberflächen entwickelt. Sie sind nicht für die persönliche Hygiene (Körperhygiene, z.B. Windelbereich) geeignet.

8. Dürfen benutzte, oder abgelaufene MAM Hygienetücher im Hausmüll entsorgt werden?

Ja, Sie können die Tücher im Hausmüll entsorgen.

9. Kann man die MAM Hygienetücher in der Toilette herunterspülen?

Nein, bitte spülen Sie die MAM Hygienetücher nicht in der Toilette herunter. Sie können den Abfluss verstopfen, da sich die Tücher in der Toilette nicht auflösen. Bitte entsorgen Sie sie im normalen Hausmüll.

10. Wie kann ich die MAM Hygienetücher zur Flächendesinfektion einsetzen?

Für die Anwendung zur Flächendesinfektion gelten folgende Dosiervorgaben und Einwirkzeiten:

Anwendungskonzentrationen:
Dosiervorgabe: Einwirkzeit 60 Sekunden Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: bakterizid/fungizid EN 1276, EN 13697, EN 1650
Dosiervorgabe: Einwirkzeit 5 Minuten Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: bakterizid/fungizid (nach DGHM) niedrige Belastung/Mechanik
Dosiervorgabe: Einwirkzeit 60 Sekunden Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe) EN 14476
Dosiervorgabe: Einwirkzeit 30 Minuten Dosierangabe: unverdünnt Bemerkung: Noro-Virus (MNV) EN14476



mambaby.com

Dosiervorgabe: Einwirkzeit 60 Sekunden
Dosierangabe: unverdünnt
Bemerkung: Rotavirus

Dosiervorgabe: Einwirkzeit 5 Minuten
Dosierangabe: unverdünnt
Bemerkung: Polyomavirus SV40

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de

11. Wie oft sollte ich Spielzeug reinigen?

Bakterien können bis zu einem Monat auf Oberflächen überleben. Wenn also das Spielzeug Ihres Babys in Berührung mit Oberflächen gekommen ist, auf denen Sie Essen zubereiten, oder wenn viele andere Kinder damit gespielt haben, sollten Sie darüber nachdenken das Spielzeug sofort zu reinigen, um Keime zu zerstören.

Badespielzeug sollte nach dem Baden gereinigt werden, da Feuchtigkeit zu Schimmel und Bakterienansammlungen führen kann.

Allgemein betrachtet reicht es, wenn Sie Spielzeug alle paar Wochen reinigen, vorausgesetzt niemand in Ihrem Haushalt ist oder war kürzlich krank.

12. Wie sollte ich Spielzeug reinigen?

Kleines Spielzeug:

Der Geschirrspüler: Kleines Spielzeug aus Plastik ohne Batteriebetrieb kann in der Regel im Geschirrspüler gereinigt werden. Sie können es zum Beispiel mit dem MAM Spülreiniger Sensitive in warmem Wasser abwaschen.

Bitte vorab die Herstellerangaben des Spielzeugs beachten.

Mit der Hand: Kleine Spielzeuge, die mit Batterien funktionieren, sollten äußerlich mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Sie können hierfür den MAM Spülreiniger Sensitive verwenden. Entfernen Sie vorher jeglichen Dreck oder Essensreste ab. Waschen Sie den Gegenstand vorsichtig mit einem sauberen Spültuch ab. Als Nächstes können Sie ihn von außen mit einem MAM Hygienetuch (60 Sek Einwirkzeit) abwischen. Lassen Sie den Gegenstand trocknen. Wenn es sich um einen Gegenstand handelt, den Ihr Kind in den Mund nimmt, wischen Sie ihn nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bevor Sie ihn Ihrem Kind geben.

Größeres Spielzeug:

Säubern Sie zuerst die Oberfläche mit einem sanften Spülreiniger und Wasser. Anschließend sollte das Spielzeug mit den MAM Hygiene Tüchern abgewischt werden. Wenn es sich um einen Gegenstand handelt, den Ihr Kind in den Mund nimmt, wischen Sie ihn nach der Einwirkzeit mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bevor Sie ihn Ihrem Kind geben.

Bitte vorab die Herstellerangaben des Spielzeugs beachten.

Stoffspielzeug:

Waschen Sie es zusammen mit der Wäsche, Waschmittel und heißem Wasser. Abhängig von der Art des Spielzeuges können Sie es an der Luft trocknen lassen oder den Wäschetrockner benutzen. Wenn Sie sich sorgen, dass das Innenfutter verklumpen könnte, legen Sie es zusammen mit einem Bündel neuer Tennisbälle in den Trockner.

Bitte vorab die Hersteller- und Waschangaben des Spielzeugs beachten.



mambaby.com

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de



mambaby.com

13. Enthalten die MAM Hygienetücher Farb- oder Duftstoffe?

Nein, die MAM Hygienetücher sind frei von Farb- und Duftstoffen.

14. Enthalten die MAM Hygienetücher Alkohol* (*Ethanol)?

Nein, die Hygienetücher von MAM enthalten keinen Alkohol* (*Ethanol).

15. Kann ich die MAM Hygienetücher auch auf Oberflächen aus Kunststoff oder Plexiglas verwenden?

Ja, denn die Hygienetücher von MAM sind besonders materialschonend und auch für Kunststoff und Acrylglas geeignet.

Bei weiteren Fragen zu den MAM Hygienetüchern können Sie uns auch gerne kontaktieren:

MAM Babyartikel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 27383 Scheeßel

E-Mail: info@mam-babyartikel.de; Tel.: 04263 9317-0 oder 0800 222 9626

MAM Babyartikel GmbH

Postfach 1266
D-27376 Scheeßel

Industriegebiet I
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
D-27383 Scheeßel

Telefon +49 4263 9317 0
Fax +49 4263 9317 20
info@mam-babyartikel.de