



Soft Brush

Online Shop

SE

SE: Skötselråd:

- Flaskborsten är tillverkad av högkvalitativa material: borsten och dinappsborsten av TPE och handtaget av PP.
- Rengör produkten före första användningen och därefter regelbundet.
- Kontrollera flaskborsten före varje användning.
- Sluta använda produkten vid första tecken på svaghet eller skada. Defekta borstar kan skada flaskor och dinappar.
- Skölj av hygienskål flaskborsten noga efter varje användning och låt den torka på en välventilerad plats.
- För att rengöra flaskborsten, tvätta med mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Flaskborsten kan köras i diskmaskinen (bestickkorgen eller översta korgen) på låg temperatur (max 60 °C).
- Låt inte flaskborsten vila direkt på de mjuka borsten i diskmaskinen. Placera flaskborsten i bestickkorgen eller i översta korgen med borsten upp.
- Använd inte starka rengöringsmedel.
- Livsmedel kan missfärga flaskborsten.
- Flaskborsten får inte kokas, ångsteriliseras eller steriliseras i mikrovågsugn.
- Sterilisering kan leda till att borsten deformeras.
- Soft Brush är lämplig för rengöring av alla flaskor och dinappar.
- Den är också lämplig för rengöring av MAM:s muggar.

För barnets säkerhet**VARNING!**

Soft Brush är inte en leksak. Förvara produkten utom räckhåll för barn.