



Nasal Aspirator

Online Shop

NO

Nasal Aspirator

Bruksanvisning

Vask nesesugeren før første bruk. Klem sammen nesesugeren for å fjerne luft. Plasser forsiktig tuppen i babyens ene nesebor mens det andre holdes lukket. Slipp deretter sakte trykket slik at suget trekker ut slim fra babyens nese. Gjenta ved behov. Rengjør umiddelbart etter bruk. Tåler sterilisering og kan vaskes i oppvaskmaskin (øverste hylle).

FOR BARNETS SIKKERHET – ADVARSEL!

Klem aldri nesesugeren mens tuppen er i babyens nese. Bruk den aldri i barnets munn eller ører. Dette produktet er ikke et leketøy. Inneholder små deler – oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå risiko for skade. Inspiser produktet før og etter hver bruk, og kast det ved første tegn til skade eller svakhet. Oppbevar emballasjen for fremtidig referanse. Ikke anbefalt for bruk med morsmelk.