



# Storage Solution

Online Shop

ES

## ES: Storage Solution

### Instrucciones de uso:

- Revise todos los componentes antes de cada uso. Desechar ante el primer signo de daño o debilidad.
- Este producto es apto para el contacto con alimentos.
- Use un lápiz para la zona de la etiqueta lavable. No use rotuladores permanentes.

### Limpieza y esterilización:

- Antes del primer uso, separe todas las partes y colóquelas en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene.
- Puede lavarse en la bandeja superior del lavavajillas (65°C / 149 F), aunque los colorantes alimentarios pueden decolorar los componentes.
- No use productos de limpieza abrasivos. Solo se deben usar cepillos de cerdas naturales o esponjas suaves. Estrapajos ásperos/duros pueden rayar el plástico.
- Esterilícelo usando uno de estos métodos: esterilización con vapor (eléctrica o en el microondas según las instrucciones del fabricante), hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos o sumergiéndolo en una solución líquida esterilizante.
- Cuando utilice el Esterilizador Eléctrico y Calienta biberones Exprés de MAM o el Esterilizador a Vapor de Microondas para esterilizar el recipiente de conservación Storage Solution, use solo una bandeja.
- Pueden apilarse las partes después de la limpieza/esterilización.

### Uso con leche materna:

- No descongele la leche materna en el microondas, si lo hace, su valor nutricional se reducirá.
- Es recomendable que la leche materna se congele en pequeñas porciones de 40-120 ml – 4 UK fl oz .
- Descongele la leche materna congelada en el frigorífico durante la noche o a temperatura ambiente.
- Para calentar la leche, colóquela en un baño de agua caliente o en un calienta biberones. Para calentar a la temperatura corporal, también puede utilizar agua corriente. Comience con agua corriente fría y gradualmente incremente la temperatura hasta que la leche esté caliente.
- Bajo ningún concepto se debe volver a congelar la leche materna. Tire la leche congelada que no haya utilizado.
- No mezcle nunca la leche recién extraída con leche congelada.
- Cuando transporte la leche materna, es importante que la cadena de frío no se interrumpa.

### Calentar la comida del bebé (no sobrecalentar):

- Para calentar la comida del bebé, recomendamos colocarla al baño maría o en un calienta biberones.
- Quite la tapa del recipiente de conservación Storage Solution antes de poner el recipiente en el baño maría o en un calienta biberones.
- Para distribuir uniformemente el calor, agite bien la comida del bebé después de calentarlo y deje tiempo para que se enfríe.

### Uso en combinación del Sacaleches Manual MAM y el recipiente de conservación Storage Solution:

- 1) Retire la base de ventilación del biberón Easy Start Anti-Colic y enrosque el recipiente de conservación Storage Solution en su lugar. Esta unidad ahora se puede enrosacar al sacaleches. Todos los tamaños del biberón Easy Start se pueden usar de esta manera (Diag.1).
- 2) Lleve el sacaleches al pecho y extraiga. Por favor, consulte las instrucciones del Sacaleches Manual MAM antes de utilizarlo. (Diag.2)
- 3) Desenrosque el recipiente de conservación Storage Solution y ciérrelo de forma segura con la tapa (Diag.3). Para ahorrar espacio puede apilarlos (Diag.4).
- 4) Para marcarlo con la fecha y la hora de extracción, utilice el área de dos partes diseñada para este propósito en el recipiente de conservación Storage Solution. Lo mejor es utilizar un lápiz.
- 5) Consérvelo durante el periodo de tiempo recomendado.

Temperatura ambiente 4 horas  
Frigorífico (4°C) 3 días / 72 horas  
Congelador (-20°C) 3 meses

- 6) Use primero la leche materna que lleve más tiempo almacenada.

### Para la seguridad y la salud de su bebé ¡ADVERTENCIA!

- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

