



Nasal Aspirator

Online Shop

IT

Aspiratore Nasale

Istruzioni per l'uso

Lavare prima del primo utilizzo. Comprimere l'aspiratore per eliminare l'aria. Inserire delicatamente la punta in una narice tenendo chiusa l'altra. Rilasciare lentamente la pressione nell'aspiratore: questo permetterà di aspirare il muco dalla cavità nasale del bambino. Ripetere se necessario. Pulire immediatamente dopo l'uso. Adatto agli sterilizzatori. Lavabile in lavastoviglie.

Per la sicurezza del tuo bambino

AVVERTENZA!

Non comprimere MAI l'aspiratore mentre si trova nel naso del bambino. Non utilizzare MAI nella bocca nelle orecchie del bambino. Questo prodotto non è un giocattolo! Contiene parti di piccole dimensioni: per evitare il rischio di lesioni, conservarlo fuori dalla portata dei bambini. Ispezionare prima e dopo ogni utilizzo. Gettare via al primo segno di usura o danneggiamento. Conservare la confezione per utilizzi futuri. Non è raccomandato l'uso con il latte materno.