



Storage Solution

Online Shop

PT

PT: Storage Solution

Instruções para utilização:

- Verifique todos os componentes antes de cada utilização. Rejeite-os aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.
- Este produto é adequado para estar em contacto com alimentos.
- Recomenda-se a utilização de um lápis na zona lavável do rótulo. Não utilize marcadores permanentes.

Limpeza e esterilização:

- Antes da primeira utilização, separe todos os componentes e coloque-os em água a ferver durante 5 minutos. Tal garante a sua higiene.
- Pode lavar-se no tabuleiro superior da máquina de lavar a loiça (max. 65° C), embora os corantes alimentares possam manchar os componentes.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize apenas escovas ou esponjas macias. Os esfregões ásperos/duros podem riscar o plástico.
- Esterilize através de um dos seguintes métodos: esterilização pelo vapor (elétrica ou no micro-ondas seguindo as instruções dos fabricantes), fervendo em água durante pelo menos 5 minutos ou com uma solução líquida para esterilização.
- Para esterilização do Recipiente para Conservação no Esterilizador Elétrico & Aquecedor de Biberões MAM ou no Esterilizador a vapor para micro-ondas MAM utilize somente um tabuleiro.
- Pode ser montado depois de secar após a limpeza/esterilização.

Utilização com leite materno:

- Não descongele o leite materno no micro-ondas, pois tal reduzirá o seu valor nutricional.
- Recomenda-se que o leite materno seja congelado em pequenas porções de 40-120 ml.
- Descongele o leite congelado colocando-o no frigorífico durante a noite ou deixando à temperatura ambiente.
- Para aquecer o leite coloque-o em banho-maria com água quente ou num aquecedor de biberões. Para aquecer à temperatura do corpo, pode também usar-se água corrente. Primeiro deixe correr água fria em seguida aumente gradualmente a temperatura até que o leite fique morno.
- Não deve em circunstância nenhuma voltar a congelar leite materno que tenha sido descongelado. Rejeite o leite aquecido que não tenha sido utilizado.
- Nunca misture leite materno recentemente extraído com leite materno congelado.
- Quando transportar leite materno é importante que não seja interrompida a cadeia de frio.

Aquecimento da alimentação do bebé (não aqueça em demasia):

- Para aquecer a comida do bebé, recomendamos que a coloque em banho-maria com água quente ou num aquecedor de biberões.
- Retire a tampa do Recipiente para Conservação antes de colocar o copo em banho-maria ou num aquecedor de biberões.
- Para distribuir uniformemente o calor, agite cuidadosamente o alimento do bebé após o aquecimento e deixe arrefecer.

Utilização em conjunto do Tira Leite Manual MAM e Recipiente para Conservação:

- 1) Retire a base ventilada do Easy Start Anti-Colic e substitua-a pelo Recipiente para Conservação. Esta unidade pode agora ser enroscada no Tira leite. Todos os tamanhos dos biberões Easy Start podem ser usados desta forma (Diag.1).
- 2) Coloque o Tira leite no peito e inicie a extração. Por favor consulte as instruções para utilização do Tira Leite Manual MAM. (Diag.2)
- 3) Desenrosque o Recipiente para Conservação e feche de forma segura com a tampa (Diag.3). Para poupar espaço pode empilhá-los (Diag. 4).
- 4) Para colocar a data e a hora da extração, utilize a zona de duas partes especialmente designada para este efeito no Recipiente para Conservação. Será melhor utilizar um lápis.

- 5) Conserve durante os períodos de tempo recomendados.

Temperatura Ambiente 4 horas
Frigorífico (4°C) 3 dias / 72 horas
Congelador (-20°) 3 meses

- 6) Utilize primeiro o leite materno que esteja conservado há mais tempo.

Para a segurança e saúde da sua criança ATENÇÃO!

- Utilize sempre este produto sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha todos os componentes que não estão a ser utilizados fora do alcance das crianças.

