



# Trainer

Online Shop

FR

### Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation : démonter entièrement le biberon, nettoyer chaque partie, puis immerger les différentes parties dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène. (Voir chapitre nettoyage).
- Avant la première utilisation, presser doucement le bout de la tétine ou du bec pour vérifier que la fente s'ouvre correctement.
- À la première ou après plusieurs utilisations, il se peut que les bords de la fente de ventilation à la base de la tétine ou du bec soient collés ensemble. Par conséquent, l'air ne circule plus dans le biberon lorsque vous alimentez votre enfant et la tétine ou le bec peut se boucher. Passez légèrement votre doigt plusieurs fois sur la fente (ventilation) afin de la rouvrir.

### Nettoyage

- Les fois suivantes (entretien usuel) : démonter entièrement le biberon et nettoyer avec soin chaque partie avec de l'eau chaude et savonneuse par mesure d'hygiène. Rincer à l'eau claire avant de stériliser. Éviter tout composé nocif, comme l'alcool, la chlorure et/ou des microplastiques. Ne pas laisser tremper dans le détergent d'entretien tel que le savon plus longtemps qu'indiqué, cela risque d'endommager le produit.
- Vérifier toutes les parties avant chaque utilisation. Examiner soigneusement la tétine/le bec avant chaque utilisation (surtout si l'enfant a des dents). Jetez-la/le au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le nettoyer. Le nettoyage du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Les fois suivantes (entretien usuel) : utiliser exclusivement du savon avec un goupillon ou des éponges douces, non abrasives pour ne pas rayer le plastique. Nettoyer le bec attentivement pour ne pas l'endommager. Vous pouvez également laver les pièces au lave-vaisselle (max 65°C à l'étage supérieur) mais les décors peuvent s'effaier. Certains aliments peuvent décolorer les pièces sans compromettre leur fonctionnement.
- S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de nourriture (y compris au niveau des surfaces cachées) dans les parties du biberon après l'avoir nettoyé et stérilisé.

### Stérilisation

**Selon les autorités de santé, il n'est pas nécessaire de stériliser le biberon comme cela a longtemps été préconisé. Il suffit de le laver soigneusement, dès que votre enfant a fini sa tétée. Si toutefois vous souhaitez le stériliser, suivez les recommandations ci-dessous.**

- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le stériliser/nettoyer. La stérilisation du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Bien nettoyer chaque partie du biberon avant stérilisation.
- Après nettoyage, stériliser dans de l'eau bouillante (laisser bouillir pendant 5 min), au micro-ondes en utilisant la stérilisation vapeur ou au stérilisateur électrique (en respectant les instructions du fabricant), ou à froid avec des comprimés de stérilisation. Laisser refroidir toutes les parties après la stérilisation.
- Ne laisser tremper aucune partie du biberon (dont la tétine et le bec) dans la solution de stérilisation plus longtemps qu'indiqué. Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive. Cela risque d'endommager le produit, la tétine ou le bec.
- N'assemblez JAMAIS les pièces du biberon lors de la stérilisation. Cela pourrait endommager le biberon et déformer le pas de vis.

**Assemblage TÉTINE/BEC :** placer la tétine/le bec dans la bague du biberon, jusqu'à entendre un « clic ». Placer les anses sur le corps du biberon et bien visser la bague contenant la tétine ou le bec.

### Réchauffage du biberon

**Il n'est pas indispensable de chauffer le biberon sauf s'il a été placé au réfrigérateur. Vous pouvez le donner à température ambiante à bébé. Si toutefois vous souhaitez le chauffer, suivez les recommandations ci-dessous.**

- Réchauffer au chauffe-biberon (y compris express et vapeur) ou dans de l'eau chaude, ou au micro-ondes. S'assurer que le biberon n'est pas exposé à la chaleur du grill.
- Ne JAMAIS verser d'eau bouillante dans le biberon.
- Ne JAMAIS réchauffer ou refroidir un liquide dans un biberon fermé. Enlever le capuchon, le bec ou la tétine avant de réchauffer. Ne pas surchauffer : cela pourrait endommager le biberon.
- Ne JAMAIS mettre le biberon au four. Ne JAMAIS chauffer le biberon sur une flamme nue ou sur un feu.
- Le réchauffage au micro-ondes nécessite de redoubler de prudence, car il peut générer localement des hautes températures qui peuvent brûler bébé. Réchauffer uniquement à la température recommandée par le fabricant de votre micro-ondes. Ne pas placer le biberon au centre du micro-ondes mais sur les côtés de la plaque pour une répartition homogène de la chaleur.
- Toujours remuer le liquide pour répartir la chaleur. Il est recommandé de remuer le biberon plutôt que de le se-

couer, afin d'éviter toute formation de bulle d'air qui pourrait provoquer des coliques. Attendre quelques instants et vérifier la température avant de nourrir votre bébé (risque de brûlure grave).

- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant.

#### **Autres informations importantes**

- Les biberons MAM sont fabriqués en polypropylène : une matière hygiénique et facile à nettoyer. Éviter d'exercer une pression importante sur le biberon, cela pourrait l'endommager.
- Ne pas agrandir les trous de la tétine ou du bec avec un objet tranchant.
- Toujours ranger le biberon propre et sec.
- Conserver les tétines/becs dans un contenant fermé et au sec.
- Utiliser uniquement des tétines/becs MAM pour les biberons de transition MAM.
- Utiliser uniquement pour des liquides et aliments non-sucrés.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas laisser bébé boire ou se promener seul avec le biberon.
- Ne JAMAIS mettre bébé au lit avec le biberon. La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- La tétine, le bec et les anses sont compatibles avec tous les biberons MAM (sauf le biberon MAM Easy Start Anti-Colique 130ml).
- Nous vous recommandons de conserver les informations relatives au produit pour une utilisation ultérieure.

#### **Pour la sécurité et la santé de votre enfant :**

##### **AVERTISSEMENTS !**

- **Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.**
- **Ne JAMAIS utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.**
- **La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.**
- **Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.**
- **Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.**
- **Garder tous les éléments non utilisés hors de la portée des enfants.**
- **Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.**