



# Nasal Aspirator

Online Shop

PT

## Aspirador Nasal

### Instruções de utilização

Lavar antes da primeira utilização. Comprimir o aspirador para retirar o ar. Colocar suavemente a ponta numa narina, mantendo a outra narina fechada. Soltar lentamente a pressão no aspirador e a sucção irá extrair o muco da passagem nasal do bebé. Repetir conforme necessário. Limpar imediatamente após a utilização. Adequado para esterilizadores. É seguro colocar no cesto superior da máquina de lavar loiça.

### PARA A SEGURANÇA DA SUA CRIANÇA

#### ATENÇÃO!

NUNCA comprima o aspirador enquanto estiver colocado no nariz do bebé. NUNCA utilize na boca ou ouvidos do bebé. Este produto não é um brinquedo! Contém componentes pequenos: para evitar o risco de lesão, mantenha fora do alcance das crianças. Inspeccione antes e após cada utilização. Rejeite-o aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste. Por favor, guarde a embalagem para referência futura. Não é recomendado para uso com leite materno.