



Manual Breast Pump


Online Shop

HU

Kézi Mellszívó

Kérjük a MAM Kézi mellszívó készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati utasítást őrizze meg későbbi használatához.

1. Termékleírás kézi használatához

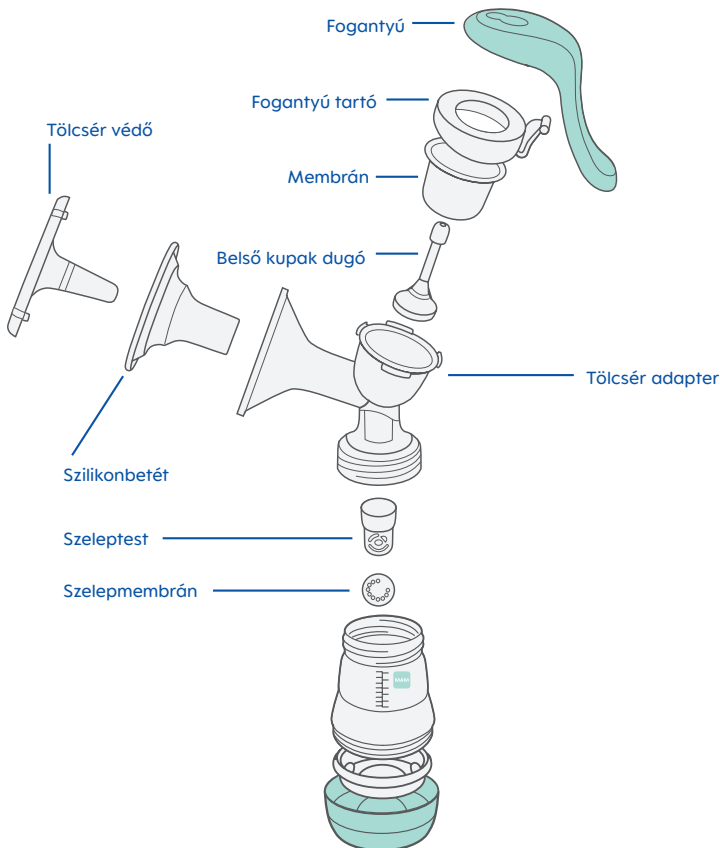

2. A készülék tisztítása és karbantartása

A MAM Kézi mellszívó készülék első használata előtt és minden használat után szét kell szedni, megtisztítani és sterilizálni az összes olyan részt, amely kapcsolatba kerül a mellet vagy az anyatejjel.

- Csak ívóvíz minőségű vizet használjunk a tisztításhoz.
- Mindig teljesen szárítsuk meg a levegőn vagy törölközővel, mielőtt újra összeszereljük.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy minden rész teljesen száraz.
- Ügyeljen arra, hogy tisztítás során ne sérüljön egyik rész sem.


2.1. Kézi tisztítás

Tisztítás előtt minden alkatrészt szét kell szedni. Minden részt öblítsen le hideg, tiszta vízzel. Aztán

minden alkatrészt mosson át szappanos meleg vízbe áztatott ruhával vagy szivaccsal és öblítsen le hideg vízzel. Ne használjon semmilyen súrolószert, például antibakteriális oldatot, mert ezek megsérthetik a készülék felületét. Törölje szárazra egy tiszta ruhával, vagy hagyja megszáradni egy tiszta ruhán.

2.2. Tisztítás mosogatógépben

A mellszívó készülék mosogatógépben történő tisztításához helyezze a szétszedett részeket a mosogatógép felső rácsára vagy az evőeszköztartó tálcára. A tisztítás során az ételmaradékok pigmentjei elszínezhetik a készülék darabjait – de ez nem befolyásolja a készülék működését. Javasoljuk, hogy a szelepet és a szelep membránt kézzel tisztítsa meg, hogy megakadályozza a sérüléseket és hogy ezek a kis alkatrészek ne vesszenek el.

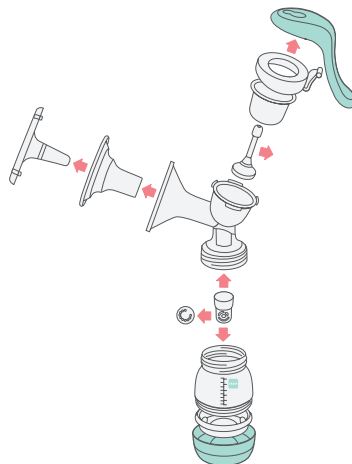

2.3. A mellszívó készülék sterilizálása

Az első és a mindennapos használat előtt, a készülék minden részét sterilizálni kell. A különálló részeket forró vízben, elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló készülékben vagy hideg sterilizáló folyadékban sterilizálhatjuk. Tárolja a mellszívó készüléket tiszta zsákban/dobozban és használja a tölcser védőt, hogy a szilikonbetét ne sérüljön a következő használatig. **Kérjük, vegye figyelembe:** soha ne sterilizálja az összeszerelt készüléket – mindig szerelje szét az alkatrészeket. **Fontos:** a Mellszívó készülék minden részét hagyja teljesen megszáradni használat előtt.


3. A készülék használata


3.1. Kézi használat

3.1.1. A készülék összeállítása

Higiéniai okokból, kérjük alaposan mosson kezet a mellszívó összeállítása előtt.



- Helyezze a szilikonbetétet a tölcserbe. Ügyeljen arra, hogy a szilikonbetét tökéletesen illeszkedjen a tölcser adapter peremére. (1. ábra)
- Helyezze be a belső kupak dugóját a membránba, úgy, hogy az tökéletesen passzoljon. (2. ábra)
- Helyezze a részeket a tölcser adapterbe. (3. ábra)
- Csavarja rá a fogantyú tartóját a membrán tetejére. (4. ábra)
- Csatlakoztassa a fogantyút a tartójához, úgy, hogy az a helyére pattanjon. (5. ábra) Állítsa a belső kupak dugóját záró (hátsó) helyzetbe úgy, hogy a kupak dugó felső részét felfelé és a fogantyúnál lévő nyílás felé húzza. (6. ábra)
- Óvatosan nyomja a szelepmembránt a szeleptestbe úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen. A szelepmembránt laposan és szorosan kell belepattintani a szeleptestbe, hogy elkerülje a levegő szívárgást. (7. ábra)
- Helyezze a szelepmembránt a szeleptesttel együtt a tölcser adapterébe. (8. ábra)
- Szorosan csavarja rá a cumisüveget a tölcser adapterre. (9. ábra)

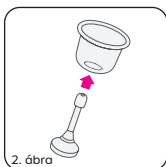

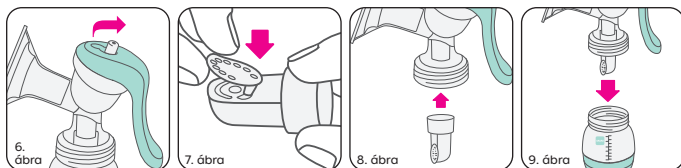

3.1.2. Felkészülés a fejésre


- Mossa meg a kezét szappanos vízzel, mellét és mellbimbóit meleg törlőruhával és öblítse le tiszta vízzel.
- Préseljen ki egy kis tejet mindkét mellbimbójából, ellenőrizze, hogy a tejcsatornák nem tömődtek el.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mellszívó megfelelően van összeszerelve és a cumisüveg jól rá van csavarva.
- Üljön kényelmesen és dőljön előre egy kicsit. Tegyen egy pohár vizet a közelbe.
- Helyezze a tölcsért szorosan a mellére. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér minden része érintkezik a mellével, ellenkező esetben a szívóhatás nem jön létre.
- Alulról támassza meg a mellét és helyezze a mellszívó tölcsért a mellére a hüvelyk- és mutatóujjával. (10. ábra)
- A szilikonbetét nélküli anyatej fejés hatékonyabb, mint a szilikonbetéttel. Érdemes eltávolítani a szilikonbetétet, amennyiben úgy kényelmesebb Önnek a fejés.

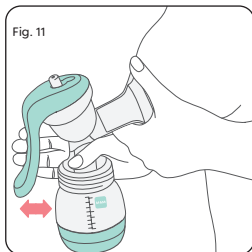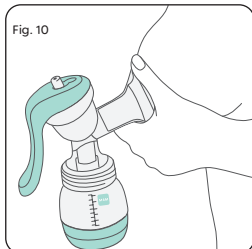

3.1.3. Fejés

- Használja a másik kezét a készülék működtetéséhez.
- Tartsa a készülék nyakát hüvelykujjával és a fogantyút a többi ujjával.
- Nyomja le és engedje fel a fogantyút (kb. 60-szor percenként), hogy a készüléket működésbe hozza. Addig pumpálja a fogantyúval a készüléket, amíg kényelmes Önnek és állítsa be a sebességet az Ön igényeinek megfelelően. (11. ábra)
- Javasoljuk, hogy az anyatej beindulásához növelje a pumpálás intenzitását. Amint az anyatej áramlani kezd, lassabb ritmusra válthat.
- Próbáljon meg folyamatosan pumpálni a készülékkel, hogy az anyatej áramlása biztosított legyen. Az anyatej fejése vagy stimulálása nem mindenki számára egyszerű.

Amennyiben a fejés kevésbé kényelmes Önnek, mint remélte, kérjen tanácsot a védőnőtől vagy más egészségügyi szakembertől.

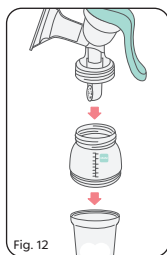

3.2. Használja a MAM tejtároló pohárral együtt

- Távolítsa el az Anti-Colic cumisüveg alját a szilikonbetéttel együtt és a helyére csavarja a Tejtároló poharat. Ezt az egységet rá lehet csavarni a mellszívóra. Minden Anti-Colic cumisüveg használható ilyen módon. (12. ábra)
- Tegye a mellszívót a mellére és kezdje meg a fejést. Kérjük kövesse a használati utasítás 3.1.3 pontjában leírtakat.
- A fejés végeztével csavarja le a Tejtároló poharat és szorosan zárja le a fedelével. (13. ábra)
- A Tejtároló pohár oldalán található speciális kétrészes felületen fel tudja tüntetni a fejés dátumát és időpontját, ehhez a ceruza a legalkalmasabb.



4. Az anyatej tárolása és a felmelegítése

4.1. Tárolás

- A lefejt anyatejet tárolhatja a MAM Anti-Colic cumisüvegben és a Tejtároló pohárban is.
- Az Anti-Colic cumisüveget a menetes tetővel, etetőcumival és kupakkal lehet lezárni.
- Az anyatej hűtőben akár 72 órán keresztül tárolható az Anti-Colic cumisüvegben, vagy a Tejtároló pohárban.
- Az anyatej a Tároló pohárban 3 hónapig tárolható mélyhűtőben. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Anti-Colic cumisüveg nem alkalmas a lefejt anyatej fagyasztóban történő tárolására.
- Ne tárolja az anyatejet a hűtőszekrény ajtajában. Ehelyett válassza a hűtő leghidegebb részét (ez a zöldségtároló feletti üvegpolc hátsó része).
- Ha a mélyhűtője 3-csillagos, akkor ne tárolja az anyatejet 2 hétnél tovább.
- Javasolt, hogy az anyatejet kisebb mennyiségekben (50–120 ml) fagyassza le. A Tejtároló poharat csak a 120 ml-es jelszintig töltsen meg a fagyasztáshoz. Soha ne töltsen túl.
- Először a legrégebben lefagyasztott anyatejet használja fel.
- Az anyatej szállítása során fontos, hogy kiolvadás után már ne fagyasszuk vissza.

4.2. Az anyatej felmelegítése

- A lefagyasztott anyatejet felolvaszthatjuk úgy, hogy egy éjszakára a hűtőbe tesszük, vagy meleg vízben vagy olyan cumisüveg melegítővel, amelynek van olvasztó funkciója, mint a MAM 6:1 Elektromos Sterilizáló és Expressz Üvegmelegítő.
- Ne melegítse az anyatejet mikrohullámú sütőben: ha mégis a mikróban melegíti, akkor értékes tápanyagok és fontos immunológiai tulajdonságok vesznek el.
- Az anyatej felmelegítéséhez tegye a cumisüveget forró vízbe vagy cumisüveg melegítőbe. A testhőmérsékletre történő melegítéshez folyó víz is használható. Kezdje hideg folyóvízzel és fokozatosan növelje a hőmérsékletet, amíg a tej meleg lesz.
- Távolítsuk el az Anti-Colic cumisüveg csavaros tetejét és tömítő gyűrűjét, mielőtt a cumisüveget a melegítéshez a vízbe vagy a cumisüveg melegítőbe helyezzük. Ügyeljen arra, hogy mindig eltávolítsa az etetőcumit és a kupakot is.
- A felolvasztott anyatejet sosem szabad újra fagyasztani. A fel nem használt anyatejet öntse ki.
- Soha ne keverje a frissen lefejt tejet a fagyasztottal.
- Mindig ellenőrizze az anyatej hőmérsékletét etetés előtt.
- Amennyiben a baba evett az anyatejes cumisüvegből, akkor a többi egy órán belül fel kell használni. Ha nem fogy el az összes, akkor a maradék anyatejet ki kell önteni.

5. Etetés

A MAM az Anti-Colic cumisüveget ajánlja az anyatejes etetéshez.

5.1. Anti-Colic cumisüveg

Használati utasítás:

- Az első használat előtt, szerelje szét és tisztítsa meg a terméket, majd tegye a cumisüveg részzeit 5 percre forrásban lévő vízbe. Ez biztosítja a higiéniát. A tisztításról többet megtudhat az erről szóló fejezetben.
- Az első használatkor és a későbbi használat során alkalmanként, a szellőzőnyílás (az etetőcumi alsó karéjának alján lévő buborékban) összeragadhat. Ez akadályozza meg a levegő bejutását a cumisüvegbe az etetés során, és ennek következtében az etetőcumi összetapad. Néhányszor lassan húzogassa át a (szellőző) buborékot hüvelykujjával vagy ujjával, a rés újbóli megnyitásához.

Tisztítás

- Minden használat előtt szerelje szét és óvatosan tisztítsa meg a terméket meleg szappanos

vízzel. Sterilizálás előtt alaposan öblítse el tiszta vízzel a higiénia biztosítása érdekében. Kerülje a káros összetevőket a szappanban, mint az alkohol, klór és/vagy mikroműanyagok. Ne hagyja az alkatrészeket az ajánlottnál hosszabb ideig a tisztítószerben, például a szappanos vízben állni, mert az negatívan befolyásolhatja a termék működését.

- Az alkatrészeket minden használat előtt vizsgálja meg és az etetőcumit minden irányban húzogassa meg. Ha károsodás vagy megromlás első jelét észleli, cserélje ki.
- A megfelelő tisztításért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni. A tisztítás összeszerelt állapotban károsíthatja a cumisüveget.
- Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható a mosogatógép felső rekeszében (max. 65° C-on). Az alkatrészek az ételszínezékektől elszíneződhetnek.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket. Csak puha kefést és szivacsot használjon. Kemény tárgyak megkarcolhatják a műanyagot.
- Tisztítás és sterilizálás után győződjön meg róla, hogy a cumisüveg részeiben nem maradt élelmiszer.

Sterilizálás

- A megfelelő tisztításért/sterilizálásért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni.
- Minden alkatrészt meg kell tisztítani sterilizálás előtt.
- Tisztítás után a cumisüveg sterilizálásához a következő eljárások egyikét alkalmazhatja: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló, a gyártók utasításai alapján), sterilizálás forró vízben legalább 5 percig vagy sterilizáló folyadék használata.
- Ne hagyja a termék részeit (beleértve az etetőcumit) az ajánlottnál hosszabb ideig sterilizáló oldatban, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak – ez negatívan befolyásolhatja a termék működését és károsíthatja az etetőcumit.
- A sterilizáláshoz vagy önsterilizáláshoz a cumisüveget SOHA ne hagyja összeszerelve, mert az károsíthatja a cumisüveget és eldeformálhatja a meneteket, amelyek mentén a cumisüveget össze kell csavarni.

Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója a mikrohullámú sütőben


Az Anti-Colic cumisüveg önsterilizáló funkciója bizonyítottan hatásos az általános háztartási kórokozók és baktériumokkal szemben. Ez egy teljesen hatékony és biztonságos folyamat. A legjobb hatás elérése érdekében figyelmesen kövesse az összes instrukciót és csak a leírás szerint használja. Ez a praktikus és idő- és energiatakarékos funkció 5 egyszerű lépésben történik. Sterilizálás előtt a cumisüveg különálló részeit mindig meg kell tisztítani!

1. lépés: A cumisüveg megtisztított alkatrészeit a következőképpen állítsa össze: Alj rész szilikon szeleppel, etetőcumit a menetes gyűrűvel, cumisüveg test és védőkupak.

2. lépés: Mérjen ki 20 ml hideg vizet a cumisüveg kupakjának segítségével. Öntse a 20ml hideg vizet a szilikon betétes szelepes aljba.

3. lépés: A menetes gyűrűt az etetőcumival helyezze az aljra. Helyezze rá a cumisüveg testet. FINOMAN csavarja rá, hogy a forró víz kiömlését elkerülje, amikor kiveszi a mikróból. NE CSAVARJA RÁ TELJESEN. Helyezze a védőkupakot a tetejére.

4. lépés: Állítsa be a mikrohullámú sütő időzítőjét az egyszerre sterilizálni kívánt cumisüvegek számának megfelelően. A mikró 500 – 1000 Watt teljesítmény szintre állítsa.

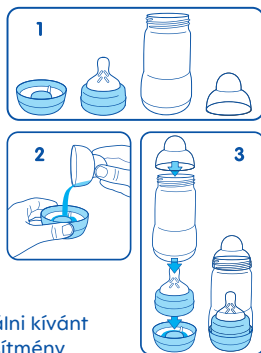

Az egyidőben sterilizálni kívánt cumisüvegek száma	1	2	3	4	5	6
Sterilizálás becsült időtartama (perc)	3	4	5	6	7	8


5. lépés: Sterilizálás után a cumisüveget hagyja kihűlni mielőtt kiveszi a mikrohullámú sütőből. Ajánlott hűtési idő: 10 perc nyitott ajtajú mikrónál. Óvatosan fogja meg az aljat és tartsa egyenesen a cumisüveget, amikor kiveszi a mikróból, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás veszélyét.

A mikrohullámú sütőben történő sterilizálás után az Anti-Colic cumisüveg akár 48 órán keresztül fertőtlenített marad, amennyiben a 3. lépésben bemutatott módon összeszerelve marad.


- Azonnali használat esetén, a maradék vizet öntse ki. Hagyja az alkatrészeket megszáradni.
- A cumisüveget összeszerelt állapotban tárolja.

Összeszerelés


- Állítsa össze a cumisüveget az alábbi ábra szerint, ellenőrizve, hogy a szelep szorosan/ megfelelően le van nyomva és az alkatrészek megfelelően össze vannak csavarva.
- Ellenőrizze, hogy a szelep a helyén van-e és hogy a cumisüveg alja szorosan van-e rögzítve mielőtt megtölti folyadékkal az üveget.

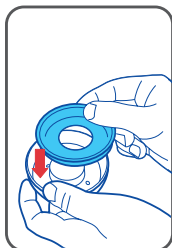


1. A szilikongyűrűt helyezze a cumisüveg aljába.

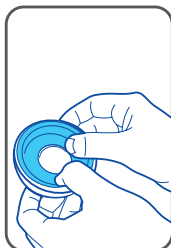

2. Nyomja le erősen a szilikonszelepet.

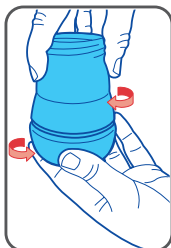

3. Az összeszerelt menetes aljat lassan, egyenletesen csavarja a cumisüveg test aljára.

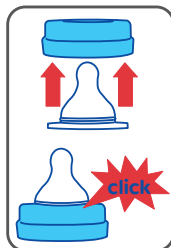

4. Helyezze az etetőcumit a felső menetes gyűrűbe, amíg egy kattanást nem hall. (klikk hang).

FONTOS TÉNYEK

- Kövesse a mikrohullámú vagy többfunkciós készülék felhasználói kézikönyvében szereplő utasításokat.
- **Ügyeljen arra, hogy az önsterilizáló cumisüveg és a mikrohullámú sütő minden része (beleértve a mikrohullámú belső oldalát és a forgótányért) TELJESEN tiszta és mentes legyen a szennyeződésektől, ételmaradványoktól, zsír- vagy olajfóccsenéstől. Ellenkező esetben a termék megolvadhat, a mikrohullámú szikrázhat vagy a burkolat megéghet!**
- Az Anti-Colic cumisüveget kizárólag szilárd és sík felületre helyezze.
- Ne tegye az Anti-Colic cumisüveget a forgótányér középre, mert az egyenetlen hőelosztáshoz vezethet.
- Ne hagyja őrizetlenül a mikrohullámú sütőt a sterilizálási folyamat alatt!
- Soha ne helyezze a cumisüveget a mikrohullámú sütőbe víz nélkül.
- Azonnal hagyja abba a sterilizálási folyamatot, ha a víz elpárolgott!
- A víz pontatlan kitöltése, a túl sok vagy túl kevés víz károsíthatja a cumisüveget.
- A mikrohullámú sütőn mindig a megfelelő teljesítményt és időt állítsa be.
- Kombinált sütő használatakor ügyeljen arra, hogy az Anti-Colic cumisüveg ne legyen kitéve a grillfunkció forróágának, mert az károsíthatja.
- **ÓVATOSAN** kezelje a sterilizált cumisüveget, mivel még forró lehet.

- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Mosson kezét a sterilizált termék megfogása előtt.
- Óvatosan fogja meg az alját és a sterilizált cumisüveget kivételkor tartsa egyenesen, hogy elkerülje a maradék víz által okozott forrázás esélyét.
- A sterilizált cumisüveget sterilizálás után ne öblítse el.
- Az etetőcumit sterilizálás után ne érintse meg. Az etetőcumit a menetes gyűrűvel együtt fogja meg.

MELEGÍTÉSI utasítások:

- Melegítéshez az alábbi módszerek egyikét alkalmazza: helyezze üvegmelegítő készülékbe; meleg folyóvíz alá; egy meleg vizet tartalmazó edénybe vagy mikrohullámú sütőbe. Győződjön meg róla, hogy a grill funkció ki van kapcsolva.
- SOHA NE töltsön forrásban lévő vizet a cumisüvegbe.
- SOHA NE melegítsen vagy hűtsön lezárt üveget. Távolítsa el a védőkupakot és az etetőcumit (a menetes gyűrűvel) melegítés előtt, különösen cumisüveg melegítőben való melegítés és mikrohullámú sütőben történő melegítés előtt. Ne melegítse túl, mert az károsíthatja a cumisüveget.
- SOHA ne tegye a cumisüveget hagyományos sütőbe. SOHA ne melegítse az üveget nyílt lángon vagy tűzőn.
- Legyen fokozott figyelemmel a mikróban történő melegítésnél, mert lokalizált túlmelegedés léphet fel. Hagyja hűlni a mikrohullámú sütő gyártója által ajánlott ideig. Ne tegye a cumisüveget a forgótányér közepére, mert az egyenetlen hőelosztást eredményezhet.
- SOHA ne melegítse az ételt tartalmazó cumisüveget 70°C fölé.
- Melegítés után tekerjen konyharuhát vagy törölközőt a cumisüveg aljára, és óvatosan döntse meg az üveget többször egymás után, hogy a fölösleges víz kiszivároгjon az alapból.
- Melegítés után ajánlott megszorítani a cumisüveg alját.
- Melegítés után mindig alaposan keverje meg az egyenletes hőeloszlás érdekében. Javasoljuk, hogy inkább keverje, mint rázza az ételt, hogy elkerülje a levegőbuborékokat, amelyek kólikás hasfájást okozhatnak.
- Mindig ellenőrizze a hőmérsékletet felhasználás előtt.

További fontos információk:

- A cumisüveg polipropilénből készült. Ez egy higiénikus, könnyen tisztítható, viszonylag lágy anyag. Kerülje a cumisüveg erős összenyomását.
- Ne használjon tűt vagy más éles tárgyat az etetőcumi nyílásának megnagyobbításához.
- Ne hagyja a babát önállóan étkezni.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Az etetőcumikat és szelepeket száraz, zárt tárolóban tárolja.
- Az anyatej fagyasztásához a MAM Tejtároló poharát használja.
- A MAM cumisüvekhez csak MAM etetőcumikat használjon.
- Csak cukor hozzáadása nélkül készült ételt vagy folyadékot használjon.
- A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben járkáljon.
- SOHA ne tegye a babát cumisüveggel az ágyba. Folyadékokkal való hosszas érintkezés súlyos fogszuvasodást okozhat.
- Az etetőcumi az összes MAM szélesnyakú cumisüveggel és Trainer+ tanuló pohárral kompatibilis.
- Kérjük őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatához.

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében: FIGYELEM!


- Folyadékok tartós és hosszú ideig tartó ivása a cumisüvegből súlyos fogszuvasodáshoz vezethet.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- Sérülés vagy anyaggyengeség első jelénél azonnal dobja el a terméket.
- Minden nem használt alkatrészt úgy tároljon, hogy a gyermekek ne érhék el.
- Soha ne rögzítse zsinórra, szalagra, csipkére vagy ruházat laza részére. Az a gyermek fulladását

okozhatja.

- Soha ne használja az etetőcumit cumiként.
- A termék mindig csak felnőtt felügyelete mellett használható.

5.2. MAM Etetőcumi SkinSoft™ szilikon felülettel a könnyű elfogadásért A babák 94%-a* gyorsan és könnyen elfogadja a szívókát.

Ez köszönhető a legmegfelelőbb anyag, anyagvastagság, forma és felület kiválasztásába fektetett időnek és energiának a termékfejlesztés során.

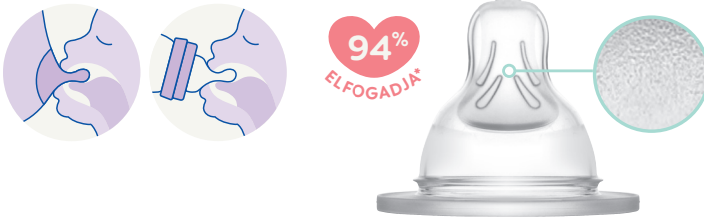

Az ovális forma tökéletesen megegyezik a szoptatás közben formálódó mellbimbó alakjával. Amikor a baba megpihen etetés közben, ez az ovális forma könnyedén megfigyelhető, mielőtt újra az eredeti formáját veszi fel.

*Piackutatás 2009–2023, 1808 babával tesztelve.



MAM SZÍVÓKA

SkinSoft szilikon felülettel

- A babák könnyen elfogadják – ismerős érzést nyújt

SZIMMETRIKUS FORMA

- Mindig tökéletesen illeszkedik a baba szájába



SZÍVÓKA MÉRET

- Különösen puha és kicsi szívóka és nyílás – ideális az újszülötteknek

SZELLŐZŐLYUK

- Megelőzi, hogy az etetőcumi behorpadjon
- Segít, hogy a folyadék lassan áramoljon

A 0-ás méretű MAM etetőcumit kifejezetten újszülöttek számára került kifejlesztésre.

A SkinSoft™ szilikon felülettel és kis szívókéval ellátott, nagyon puha etetőcumi tökéletesen illeszkedik az újszülöttek igényeihez. Az etetőcumi különösen kicsi, szimmetrikus és lapos, a végén egy olyan nyílással, amely kifejezetten arra készült, hogy az anyatej könnyedén át tudjon rajta haladni.

A MAM etetőcumi 6 különböző méretben kapható:

0 hónap	0+ hónap	2+ hónap	4+ hónap	4+ hónap	6+ hónap
Extra lassú folyású 0-ás méretű etetőcumi	Lassú folyású 1-es méretű etetőcumi	Közepes folyású 2-es méretű etetőcumi	Gyors folyású 3-as méretű etetőcumi	Gyors folyású csepegésmentes etetőcumi	Gyors folyású etetőcumi sűrűbb folyadékokhoz
A baba ivási szokásaitól függgően variálható.					

6. Hibaelhárítás – Kézi mellszívó készülék

Ha a szívóerő gyenge vagy nincsen

- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően illeszkedik-e az összes ponton.
- Ellenőrizze, hogy a szilikonpárna szilárdan be van-e helyezve a tölcsérbe.
- Ellenőrizze, hogy a szeleptest szilárdan csatlakozik-e a tölcsérhez.
- Ellenőrizze, hogy a membrán kupakja/ fogantyú tartója megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a mellhez tökéletesen illeszkedik a készülék.

Tej visszaáramlás

- Ha a membránban tej vagy víz található, öblítse le a membránt tiszta, forró vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a membrán nem sérült-e meg.