



Silicone Soother

Online Shop

HU

Cumi használati útmutató:

Első használat előtt 5 percig főzze ki a cumit. Hagyja hűlni további 5 percig, és nyomja ki a szívókába jutott vizet. Ez biztosítja a higiéniát.

Minden használat előtt tisztítsa meg a cumit. Sterilizálási módszerek: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú) sterilizáló folyadék használat a gyártó utasításai alapján, vagy sterilizálás forró vízben legalább 5 percig.

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

Soha ne mártsa bele a cumit édes anyagokba, mert fogszuvasodást okozhat.

Higiéniái és biztonsági okokból cserélje ki a cumit egy-két hónapos használat után.

Ha a baba teljesen betenné a cumit a szájába ne ijedjen meg. A cumi úgy lett kialakítva, hogy ne okozhasson fulladást. Óvatosan távolítsa el a cumit.

A MAM azt javasolja, hogy 3 éves korig szoktassa le a babát a cumizásról.

Éjszakai cumihoz: Tartsa a cumit fényen (ne közvetlen napsütésen) napközben, hogy a gomb világítson éjjel. A gomb LED fényre nem töltődik.

Gyermeke biztonságáért

FIGYELEM!

Minden használat előtt vizsgálja meg, és húzogassa meg a cumi szívókáját minden irányba. Ha az anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja el. Kizárólag az EN 12586 szabványnak megfelelő cumitartót használjon. Ne tegyen egyéb szalagot vagy zsinórt a cumira, mert a gyermek megfulladhat tőle.

Ne tegye ki a cumit közvetlen napsütésnek vagy forróságnak, és sose sterilizálja hosszabb ideig, mint amennyi javasolt, mert ezek elgyengíthetik a szívókát.

