



Nasal Aspirator

Online Shop

SE

Nasal Aspirator

Bruksanvisning

Rengör nässugen före första användning. Tryck ihop nässugen för att tömma den på luft. Placera försiktigt spetsen i barnets ena näsborre medan du håller den andra stängd. Släpp sedan långsamt trycket så att suget drar ut slem från barnets näsa. Upprepa vid behov. Rengör direkt efter användning. Lämplig för sterilisering och diskmaskin (översta facket).

FÖR DITT BARNS SÄKERHET –

VARNING!

Tryck aldrig ihop nässugen när spetsen är i barnets näsa. Använd den aldrig i barnets mun eller öron. Produkten är inte en leksak. Innehåller små delar – förvara utom räckhåll för barn för att undvika risk för skador. Kontrollera nässugen före och efter varje användning och kassera den vid första tecken på skada eller slitage. Spara förpackningen för framtida referens. Ej rekommenderad för användning med bröstmjölk.