



Nasal Aspirator

Online Shop

HU

Orrszívó

Használati utasítás

Első használat előtt mosd meg. Nyomja össze az orrszívót, hogy kiszorítsd belőle a levegőt. Óvatosan helyezd a hegyét az egyik orrlyukba, ezalatt a másikat a másikat csukva tartva. Lassan engedd ki a nyomást a szívófejből, és a szívóerő kiszívja a nyálkát a baba orrjáratából.

Ismételd meg, ha szükséges. Használat után azonnal tisztítsd meg. Sterilizálható. Mosogatógépben mosható.

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN – FIGYELEM!

SOHA ne nyomd össze az orrszívót, amíg az a baba orrában van. SOHA ne használd a baba szájában vagy fülében. Ez a termék nem játék. Kis alkatrészeket tartalmaz: a sérülésveszély elkerülése érdekében gyermekektől elzárva tárold. Minden használat előtt és után ellenőrizd. Bármilyen sérülés vagy gyengeség j első ele esetén dobd ki. Kérjük, őrizd meg a csomagolást későbbi tákékoztatás érdekében. Nem ajánlott anyatejjel való használatra.