



Mini Cooler & Clip

Online Shop

IT

Mini Cooler: Istruzioni per l'uso:

Prima del primo utilizzo e prima di ogni successivo utilizzo lavare con acqua calda usando un detergente delicato. Il sapone non deve contenere sostanze nocive quali alcol, cloro e/o microplastica. Ripetere l'operazione regolarmente.

Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore (max. 65°C). I coloranti alimentari potrebbero modificare il colore originale dei prodotti. Per un effetto rinfrescante ottimale mettere il dentaruolo in frigorifero per un'ora. Non mettere nello scompartimento del ghiaccio né in congelatore.



Per la sicurezza del vostro bambino


AVVERTENZA!

NON BOLLIRE, NON STERILIZZARE A VAPORE NE' NEL MICROONDE. Per la pulizia lavare con acqua calda. Il dentaruolo è adatto a bambini dai 2 mesi. I bambini più grandi e gli adulti potrebbero perforare la sezione rinfrescante. L'acqua distillata contenuta è innocua e controllata periodicamente.



CLIP: Istruzioni per l'uso:

La chiusura con gancio e laccio afferra saldamente non solo il dentaruolo ma anche i succhiotti con anello (figura A). La clip si apre spostando il cursore verso il nastro e si chiude spostandolo verso le estremità arrotondate (figura B). La clip deve essere attaccata solamente agli indumenti. La clip deve essere sempre pulita e conservata in posizione aperta per evitare che perda la propria resistenza. Non conservarla in posizione chiusa. Pulire regolarmente la clip con acqua tiepida e detergenti delicati. Risciacquare con attenzione. NON BOLLIRE, NON STERILIZZARE A VAPORE NE' NEL MICROONDE. Non utilizzare solventi o detergenti chimici abrasivi in quanto potrebbero danneggiare il prodotto. Si sconsiglia l'utilizzo della clip mentre il bambino si trova nel letto, nella culla, nella carrozzina oppure mentre dorme.

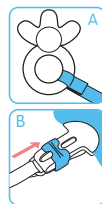

Per la sicurezza del vostro bambino

AVVERTENZA!

Prima di ogni uso controllare attentamente la clip. Sostituirla al primo segno di usura o danneggiamento. Non allungare mai il trattieni succhiotto! Non collegarlo mai a cordini, nastri, stringhe o parti larghe dell'indumento. Il vostro bambino potrebbe strangolarsi. Verificare che entrambe le estremità della clip siano adeguatamente fissate prima di lasciare il bambino incustodito.

La clip non deve essere usata come dentaruolo o giocattolo.

Tenere la protezione rimovibile della tettarella lontano dai bambini per evitare il soffocamento.

La clip rispetta i requisiti dei seguenti Standard Europei: EN 12586:2025