



Storage Solution

Online Shop

FR

Pots de conservation

Conseils d'utilisation :

- Vérifier tous les éléments avant chaque utilisation. Les jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.
- Le produit est approprié pour le contact alimentaire.
- Il est recommandé d'utiliser un crayon pour la zone d'écriture lavable. Ne pas utiliser de marqueurs permanents.

Nettoyage et stérilisation :

- Avant la première utilisation, séparer les différentes parties et les faire bouillir 5 min.
- Lavable au lave-vaisselle (compartiment du haut, température max 65°C) mais certains aliments peuvent détériorer sur le pot de conservation et son couvercle.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants abrasifs. Seuls des goupillons doux ou des éponges douces doivent être utilisés. Les éponges à récurer peuvent rayer le plastique.
- Si vous souhaitez stériliser, utiliser l'une des méthodes suivantes : stérilisation vapeur (électrique ou au micro-ondes selon les instructions du fabricant), dans de l'eau bouillante pendant une durée de 5 minutes ou avec des comprimés de stérilisation.
- Vous pouvez empiler les pots une fois lavés et dès qu'ils sont secs.

Utilisation avec le lait maternel :




- Ne pas décongeler le lait maternel dans le micro-ondes, cela réduirait sa valeur nutritionnelle.
- Il est recommandé que le lait maternel soit congelé en petites quantités de 40 à 120ml.
- Décongeler le lait pendant la nuit dans le réfrigérateur ou à température ambiante.
- **Il n'est pas indispensable de chauffer le biberon sauf s'il a été placé au réfrigérateur. Vous pouvez le donner à température ambiante à bébé. Si toutefois vous souhaitez le chauffer, suivez les recommandations suivantes.**
- Pour réchauffer le lait, placer le pot dans de l'eau chaude ou au chauffe biberon. Pour le réchauffer à température ambiante, l'eau courante peut aussi être utilisée. Commencer à l'eau froide et augmenter progressivement la température jusqu'à ce que le lait soit chaud.
- En aucun cas le lait maternel ne doit être recongelé. Jeter le lait réchauffé non utilisé.
- Ne jamais mélanger le lait maternel frais avec le lait congelé.
- En transportant le lait maternel, il est important que la chaîne du froid ne soit pas rompue.

Réchauffage d'aliments pour bébé (NE PAS SURCHAUFFER) :

- Pour réchauffer des aliments pour bébé, il est recommandé de les placer dans de l'eau chaude ou au chauffe biberon.
- Avant de réchauffer les aliments dans de l'eau chaude ou au chauffe biberon, retirer le couvercle du pot de conservation.
- Après avoir chauffé les aliments, les remuer et laisser refroidir.

Utilisation avec le tire-lait manuel MAM et stockage :

- 1) Enlever le fond dévissable du biberon Easy Start™ Anti-coliq et visser le pot de conservation à sa place. Cet ensemble peut maintenant être vissé sur le tire-lait. Tous les biberons Easy Start™ Anti-coliq MAM peuvent être utilisés de cette façon. (Visuel.1)
- 2) Poser le tire-lait sur votre sein et activer la poignée. Référez-vous s'il vous plaît au mode d'emploi du tire-lait manuel MAM. (Visuel.2)
- 3) Dévisser le pot de conservation et le fermer en vissant fermement le couvercle hermétique. (Visuel.3). Pour gagner de la place, vous pouvez les empiler.
- 4) Pour écrire la date et l'heure, utiliser la zone d'écriture lavable sur le pot de conservation. Écrire avec un crayon.
- 5) Temps de conservation recommandé.
Température ambiante : 4 heures
Réfrigérateur (4°C) : 48 heures
Congélateur (-20 °C) : 4 mois
- 6) Utiliser d'abord le lait maternel le plus ancien.

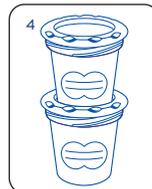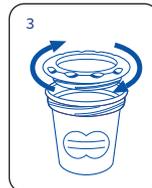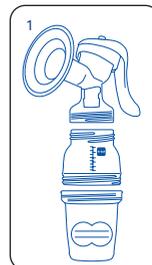

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant

- **Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.**
- **Garder toutes les parties hors de portée des enfants.**