



Nasal Aspirator

Online Shop

GR

Αποφρακτήρας μύτης

Οδηγίες χρήσης

Πλύνετε πριν από την πρώτη χρήση. Πιέστε τον αποφρακτήρα για να απομακρύνετε τον αέρα. Τοποθετήστε απαλά την κορυφή στο ένα ρουθούνι, κρατώντας το άλλο κλειστό. Απελευθερώστε σιγά σιγά πίεση και ο αποφρακτήρας θα αναρροφήσει τις βλέννες από τη ρινική κοιλότητα του μωρού. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο είναι απαραίτητο. Καθαρίστε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση. Κατάλληλο για πλύσιμο σε αποστειρωτή και στο πάνω ράφι του πλυτηρίου πιάτων. αποφρακτήρα για να απομακρύνετε τον αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΟΤΕ μην πιέζετε τον αποφρακτήρα ενώ βρίσκεται μέσα στη μύτη του μωρού. ΠΟΤΕ μην τον χρησιμοποιείτε στο στόμα ή στα αυτιά του μωρού. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Περιέχει μικρά εξαρτήματα: για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ελέγξτε το πριν και μετά από κάθε χρήση. Πετάξτε το με την πρώτη ένδειξη φθοράς. Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά. Δεν συνιστάται η χρήση με μητρικό γάλα.