



Nasal Aspirator

Online Shop

NL

Neusreinger

Gebruiksaanwijzing

Was voor het eerste gebruik. Druk op de reiniger om lucht te verwijderen. Plaats de tip voorzichtig in één neusgat terwijl je het andere dicht houdt. Laat de druk op de reiniger langzaam los en de zuigkracht zal het slijm uit de neusholte van de baby verwijderen. Herhaal indien nodig. Reinig onmiddellijk na gebruik. Geschikt voor sterilisatoren. Geschikt voor de bovenste lade van de vaatwasser.

VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND

WAARSCHUWING!

Druk de aspirator NOOIT samen terwijl deze zich in de neus van de baby bevindt. Gebruik het product NOOIT in de mond of oren van de baby. Dit product is geen speelgoed. Bevat kleine onderdelen: om letsel te voorkomen, buiten bereik van kinderen bewaren. Controleer het product voor en na elk gebruik. Gooi het product weg bij de eerste tekenen van beschadiging of slijtage. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik. Niet aanbevolen voor gebruik met moedermelk.