



Nasal Aspirator

Online Shop

DK

Nasal Aspirator

Brugsanvisning

Vask næsesugeren før første brug. Tryk næsesugeren sammen for at fjerne luft. Placer forsigtigt spidsen i barnets ene næsebor, mens det andet holdes lukket. Slip derefter langsomt trykket, så suget fjerner slim fra barnets næse. Gentag om nødvendigt. Rengør straks efter brug. Egned til sterilisering. Kan vaskes i opvaskemaskine (øverste hylde).

FOR DIT BARNS SIKKERHED – ADVARSEL!

Tryk aldrig næsesugeren sammen, mens spidsen er i barnets næse. Brug den aldrig i barnets mund eller ører. Dette produkt er ikke legetøj. Indeholder små dele – opbevares utilgængeligt for børn for at undgå risiko for skade. Kontroller næsesugeren før og efter hver brug, og kassér den ved første tegn på skade eller svækkelse. Gem emballagen til senere reference. Ikke egned til brug med modermælk.